

Procedimiento de control de infecciones de la punta

Después de cada paciente

Es de suma importancia limpiar la punta del escáner tras cada paciente para garantizar un control adecuado de infecciones.

1. Retire la punta del escáner de éste.

- 2.** Con un cepillo de cerdas suaves, como un cepillo de dientes suave, enjuague y cepille la **superficie externa** de la punta bajo un chorro de agua templada (3-3,5L/min @ 30°-35°C) durante un mínimo de 15 segundos, insistiendo especialmente en el indicador de alineación de la punta.
- 3.** Enjuague y cepille alrededor del borde y en torno a las hendiduras del espejo bajo el chorro de agua durante un mínimo de 30 segundos.

Para evitar arañar el espejo, tenga cuidado de que únicamente las cerdas toquen su superficie.



La imagen de ejemplo se muestra sin agua corriente por cuestiones de visibilidad. Utilice las cerdas del cepillo pequeño en todos los bordes de la hendidura del espejo (ej., se muestra cepillo Pinn-Point).

- 4.** Tras cepillar, enjuague el espejo y la hendidura circundante bajo el chorro de agua durante otros 15 segundos.
- 5.** Seque el espejo con una toallita para lentes ópticas.
- Si quedan restos visibles después de realizar los pasos de limpieza anteriores, repita el proceso.
 - Si quedan restos que no pueden eliminarse o algún deterioro visible como grietas o decoloración, la punta debe eliminarse y sustituirse.
- 6.** Coloque cada punta del escáner individualmente en una bolsa para autoclave.
- 7.** Coloque de una a tres bolsas por bandeja o casete. **NO apile las puntas encima o alrededor de otros instrumentos metálicos.**
- 8.** Seleccione el ciclo de autoclave para **instrumentos envueltos** con una temperatura mínima de esterilización de 132° C.
- Para autoclaves con **prevacío**, el tiempo de esterilización mínimo es de **3 minutos**.
 - Para autoclaves por **gravedad**, el tiempo de esterilización mínimo es de **10 minutos**.
- Para cualquier autoclave, emplee un tiempo de secado mínimo de 10 minutos. **Los tiempos del ciclo de esterilización en autoclave superiores a 10 minutos podrían considerarse excesivos y pueden dañar la punta.**
- 9.** Tras finalizar el ciclo, almacene para un uso posterior.

Especificaciones del fabricante, información adicional y precauciones

- Antes de realizar el escaneo, constate visualmente que el espejo de escaneo y las superficies de conexión del escáner están limpios y secos.
- Para limpiar cualquier superficie, utilice un paño óptico con una pequeña cantidad de alcohol para eliminar los residuos con suavidad.
- Asegúrese de que la superficie esté seca antes de realizar la conexión en el escáner.



Los tiempos de ciclo, parámetros y nombres de los autoclaves difieren entre los fabricantes y los tipos de autoclaves. Consulte el manual de su fabricante para esterilizar instrumentos envueltos. **Los tiempos del ciclo de esterilización en autoclave superiores a 10 minutos podrían considerarse excesivos y pueden dañar la punta.** Para verificar que se cumplen los parámetros mínimos del ciclo, consulte el manual del usuario del fabricante del autoclave. Para obtener más información, consulte el manual del usuario de Planmeca FIT® o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



NO utilice un esterilizante químico.
NO coloque en un sistema de limpieza por ultrasonidos.
NO meta en una bolsa con otros instrumentos.
NO apile las puntas encima o alrededor de otros instrumentos metálicos.
Unos tiempos de ciclo excesivos podrían reducir prematuramente la vida útil y el funcionamiento de la punta.